

NEW

ノンバック ブレーキシステム

CRT-SG-3B

使用者がお尻を浮かすとノンバックブレーキシステムが作動、
駐車ブレーキのかけ忘れによる転倒事故を防ぎます。



座るとノンバックブレーキシステムが解除



立つ(お尻を浮かす)とノンバックブレーキシステムが作動



ハイポリマー
タイヤでも
このシステムが
使用できるように
なりました。

補装具 レディメイド式


品番 **CRT-SG-3B** TAIS: 001.22-000702 **¥184,000** (非課税価格)

自走型

重量: 14.5kg ※1

前座高: 405mm (低座面)
(445mm ※2)

●商品コード / CJ01165

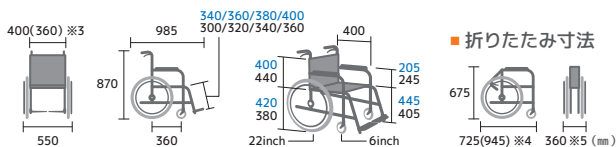

*スペックの青文字はクッション込の寸法です。



ローラー部(着座状態)



ブレーキユニット



標準装備: SKブレーキ

ブレーキのかけ忘れを防いで転倒を防止。

使用者が車いすからお尻を浮かすと、ノンバックブレーキシステムが作動します。これにより、万が一駐車用ブレーキをかけ忘れて車いすに乗り降りした場合でも、車いすの後方移動を抑え、後方への転倒事故を防止し、被害を軽減します。

ノンバックブレーキシステムの構造。(特許取得済)

座ると座面の中央にあるローラーが押され、車いすの下部にあるブレーキユニットが解除されます。お尻を浮かすとローラーが元の位置に戻り、ブレーキが作動します。 ※車いすに乗り降りする際は、必ず駐車用ブレーキをかけましょう。

▶ 主な装備: 装備の詳細い説明は、P1・2をご覧ください。

●SKブレーキ ●スライド延長ブレーキ ●ワンプッシュ式ステップ ●ワンタッチキャスタ ●ウェーブ型ハンドリム(自走) ●ハイポリマータイヤ ●専用クッション ①ウイング ②スイングアウト ⑦低座面 ●ノンバックブレーキシステム

■ カテゴリー & 機能マーク



■ シートカラー

耐荷重100kg



品番・商品コードを発注時にご指示ください。

適応体重は30kg以上です。

※ハイポリマータイヤ(ノンバックタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

※ノンバックブレーキシステムは、万が一駐車用ブレーキをかけ忘れて車いすに乗り降りした際に、車いすの後方移動を抑える補助機能です。

※1 クッションを含んだ重量です。 ※2 クッション込の寸法です。
※3 シート幅はサイドガードの内々の幅、()内は座シートの幅です。
※4 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままの寸法です。
※5 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート・クッション(背・座)を外した時の寸法です。



CRT-SG-3B

※3キの車いすはコンパクトに折りたためます。